



Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik deze gebruiksaanwijzing volledig doorlezen.

Candida-Check® is een kwalitatieve sneltest voor thuisgebruik om een vaginale schimmelinfectie (Candida) in vaginaal sereet aan te tonen.

WANNEER CANDIDA-CHECK® GEBRUIKEN?

Indien u last heeft van een of meerdere onderstaande symptomen, is het mogelijk dat u een vaginale schimmelinfectie heeft.

Candida-Check® kan dit aantonen middels wat vaginaal sereet (af te nemen via bijgesloten wattenstaafje):

- Acute jeuk in de vaginastreek
- Vaginale afscheiding en/of onaangename geur
- Uitslag op of rond de vagina
- Pijn bij het plassen of tijdens geslachtsverkeer



GEBRUIK

Vorbereiding:


1. Test uitvoeren bij kamertemperatuur (15 - 30 graden Celsius)
2. Leg een horloge of stopwatch gereed
3. Was uw handen grondig
4. De test en het wattenstaafje pas vlak voor het testen uit de verpakking halen
5. Indien de test of afdekking van de test beschadigd is, deze niet meer gebruiken

UITVOEREN VAN DE TEST

1. Haal de test en het wattenstaafje uit de verpakking en leg deze op een schone en vlakke ondergrond.
2. Houd met de ene hand de test vlak op de ondergrond vast en verwijder met de andere hand voorzichtig de aluminium afdekking. LET OP: de test bevat vloeistof die niet mag weglopen.

3. Gebruik het wattenstaafje om wat vaginaal sereet af te nemen. Voer het staafje in uw vagina in tot uw hand de buitenste schaamlippen aanraakt. Draai vervolgens het wattenstaafje 5 maal rond om op verschillende plekken materiaal af te nemen. Verwijder het wattenstaafje daarna voorzichtig.

4. Doop nu het wattenstaafje in de opening van de test (zie afbeelding A) en roer het staafje 10 tot 15 maal krachtig om. Het testmateriaal komt zo in aanraking met de vloeistof in de test.

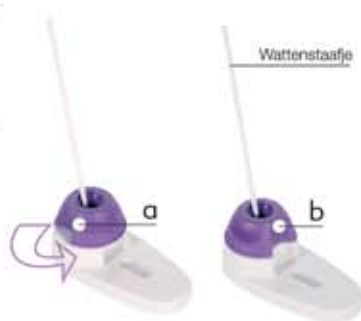

5. Houd de test met een hand vast op de ondergrond en draai met de andere hand de paarse dop een kwartslag tegen de wijzers van de klok in (zie afbeelding A). Draai vervolgens de dop weer een kwartslag terug met de wijzers van de klok mee. Herhaal dit nog tweemaal. Na dit 3 maal draaien van de paarse dop, dienen de beide inkepingen (zie afbeelding B) boven elkaar te liggen.

6. Na 5-10 minuten kunt u het resultaat aflezen. De test niet meer beoordelen na meer dan 20 minuten.

BEOORDELEN TESTRESULTAAT

POSITIEF
Twee gekleurde lijnen verschijnen. De (C)ontrolelijn dient om te laten zien dat de test correct is uitgevoerd. De tweede (T)estlijn geeft een positief resultaat weer. De kleur of intensiteit van de lijnen kan verschillen. Dit heeft geen invloed op het testresultaat.

NEGATIEF
De controlelijn wordt weergegeven. De Testlijn verschijnt niet.

ONGELDIG
Er verschijnt geen Controlelijn en de test is ongeldig. Zelfs indien er wel een Testlijn verschijnt. Voer de test opnieuw uit met een nieuwe test.

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

- Een negatief resultaat sluit andere infecties niet uit
- Niet eten, drinken of roken tijdens het uitvoeren van de test
- Buiten bereik van kinderen houden
- De test niet gebruiken binnen 7 dagen na gebruik van medicijnen tegen een vaginale schimmelinfectie (Candida)
- De test niet gebruiken binnen 24 uur na het gebruik van intieme hygiëne producten als wasemulsies, gels of crèmes

Inhoud verpakking:

- 1 testcassette + droogmiddel
- 1 wattenstaafje
- Deze gebruiksaanwijzing

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Wat moet ik doen als het resultaat negatief is, maar ik toch klachten blijf houden?

Neem in dat geval contact op met uw (huis)arts. Wellicht heeft u een andersoortige infectie.

Wat moet ik doen als het resultaat positief is?

Het staat u vrij om in dat geval een zelfzorg product aan te schaffen via apotheek of drogist. U kunt echter ook uw (huis)arts raadplegen. Candida-check® is een betrouwbare methode om een vaginale schimmelinfectie aan te tonen. De definitieve diagnose en behandelingsmethode dient door uw arts te worden bepaald.

Hoe weet ik dat ik het wattenstaafje correct heb gebruikt?

Dit weet u zeker indien er een Controlelijn verschijnt. De test is bovendien erg gevoelig en in staat om ook een geringe hoeveelheid vaginale schimmel aan te tonen.

De test is gevallen. Kan ik de test nog gebruiken?

Indien alle onderdelen intact zijn is de test nog te gebruiken. Als een van de onderdelen echter beschadigd is dient u de test niet meer te gebruiken.

Moet ik de test op een bepaalde tijd uitvoeren?

Nee. U kunt de test uitvoeren op een voor u prettig moment.

Wat moet ik doen als voor of tijdens het uitvoeren van de test er vloeistof uit de test is gelopen?

In dat geval is de test ongeldig. De complete hoeveelheid vloeistof in de test is nodig voor een juiste bepaling.

Kan ik de test nog doen als het wattenstaafje nadat het uit de verpakking is gehaald op de grond is gevallen?

Nee. Uit hygiënische gronden raden wij dringend af om het wattenstaafje dan nog te gebruiken!

Als ik per ongeluk voordat ik het wattenstaafje in de test heb gedaan of voordat de aluminium afdekking heb verwijderd al aan de paarse dop heb gedraaid, mag ik de test dan nog gebruiken?

Nee. Zodra het paarse gedeelte van de test is gedraaid begint de test te lopen. Dit kan niet meer ongedaan worden gemaakt en de test kan daarna niet meer worden gebruikt.

	[IVD]	
Gebruiksaanwijzing volgen	Alleen voor In Vitro Diagnostische doeleinden	Uiterste houdbaarheidsdatum
Bewaartemperatuur 2 tot 30 graden Celsius (niet invriezen)	Aantal testen per verpakking	Voor eenmalig gebruik
		[LOT]
		Lotnummer

www.candida-check.nl

CE 0197
Instructions English
Information as of: November 2009



NanoRepro AG
Untergasse 8
35037 Marburg



For the love of life.

Exclusieve distributie Benelux:
Dutch Diagnostics BV
Zutphen, Nederland

Gebruiksaanwijzing Nederlands
Versie: april 2011

Zelf meten
Eerder weten